


Contenido Ref.149980

- 1 bolsa con auto cierre para la conservación de los dispositivos (A)
- 1 bolsa con cierre adhesivo para la devolución de los dispositivos (B)
- 3 tubos transparentes con líquido en su interior
- 3 tubos con cucharilla y extremo cónico


Instrucciones de uso:

Recoger muestras de 3 días alternos, siguiendo el siguiente procedimiento para cada muestra:


- 1** Sacar 1 tubo con líquido y 1 tubo con cucharilla y extremo cónico de la bolsa.

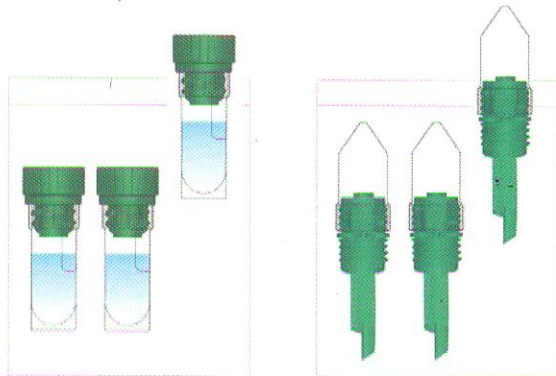

- 2** Colocar un recipiente o papel (periódico, revista) limpio en el wáter para recoger las heces

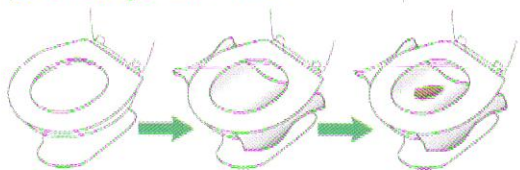


- 3** Recoger una muestra de heces del tamaño de una avellana grande con la cucharilla que está unida al tubo con extremo cónico.

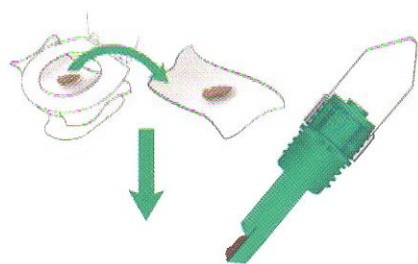

- 4** Abrir el tubo desenroscando el tapón verde.




Tirar el tapón a la basura.

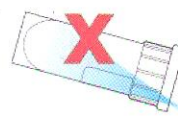


NO tirar el líquido.

- 5** Introducir la cuchara con muestra en el tubo con líquido y cerrar enroscando, comprobando que queda bien cerrado y no pierde líquido.

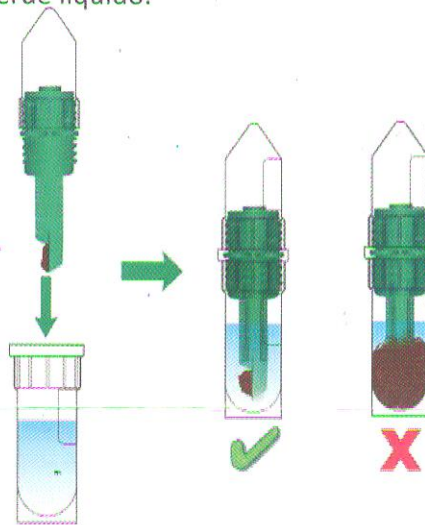

- 6** Guardar los tubo en la bolsa de plástico, a temperatura ambiente, hasta que se entreguen al centro de salud.

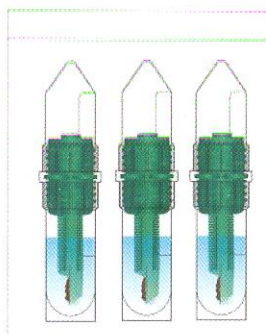

¡Importante!

El contenido líquido de los recipientes es tóxico (solución AlcorFix™).



NO INGERIR.



Mantener fuera del alcance de los niños. En caso de ingestión accidental, beber gran cantidad de leche o agua y llamar al Servicio de Información Toxicológica: 91 562 04 20. Si el contenido líquido entra en contacto con piel, ojos y mucosas, lavar con abundante agua y consultar inmediatamente con un servicio médico.

APACOR

Midi Parasep® SF
Guía para la Recogida de Muestras de Heces

APACOR

UNIT 5 SAPPHIRE CENTRE
FISHPONDS ROAD, WOKINGHAM
BERKSHIRE, RG41 2QL, UNITED KINGDOM
TEL: +44 (0)118 979 5566
FAX: +44 (0)118 979 5186

EC REP

MDSS GmbH
Schiffaraben 41
30175 Hanover
Germany

CE

2

IVD

APA386 - V2.2 01/2021